

uro·mini 3200s

特 長

- 業界最小サイズで場所をとらない。
- スピッツに自動採取。サンプリングボトルも自動洗浄!
- 採尿カップも自動洗浄。
- タッチパネルでも簡単操作。
- バーコード付でも簡単操作。(オプション)
- 患者様の名前を機械が“語り”かけます。
- プリンター(オプション)バーコード印刷可能。
- プログラム設定により測定人数を1、2、4、5、10、15、20人に設定可能。
- 結石等が採取できるように投入口下部に網をつけています。

大型タッチパネルディスプレイ

液晶表示画面は、大型タッチパネルを採用し、操作も簡単。

プリンター(オプション)

尿投入口扉

扉は必要に応じて自動開閉します。

バーコードリーダー(オプション)

洗浄液ボトル

強力洗浄でいつでも清潔に使用できます。

スピッツボックス

5検体までの尿がスピッツに自動採取できます。



サンプリングボトル

サンプリングボトルは自動洗浄されます。

仕様

項目	内容
製 品	ウローミニ3200S
測定人数	1名、2名、4名、5名、10名、15名、20名(プログラム設定により選択可能)
サンプリング尿採取数	測定管理人数1名時1検体、測定管理人数2名時2検体、測定管理人数4名時4検体、測定管理人数5名時5検体 測定管理人数10名時5検体、測定管理人数15名時5検体、測定管理人数20名時5検体 早朝尿採取可能、防腐剤投入可能 サンプリングボトルの最大採取量220ml
測定項目	比重 1.000~1.075 尿量 20ml~1000ml
測定精度	比重 ±0.003 尿量 20ml~199ml ±10% 200ml~1000ml ±5%
カップ洗浄機能	有り
サンプリングボトル洗浄機能	有り
スピッツ分注機能	有り(サンプル尿をスピッツに1~3本採取可能)
表 示	①グラフィックLCD(320*240ドット) タッチキー機能付 バックライト付液晶ディスプレイ *測定毎の尿比重(4桁)尿量(4桁)*測定毎の患者名*測定時の操作指示*設定時の操作指示*トラブルの内容表示 ②パワーランプ
音 声	測定時の操作指示 患者名再生機能(測定時に患者名音声出力可) 音量7段階調整及び昼夜音量自動切換え機能
プ リ ント	ラインサーマルプリンター(オプション) 患者別データ印字、患者番号、日付、測定時刻、比重、尿量、 24時間の総尿量及び加重平均比重
バーコード	バーコードリーダー内蔵可能(オプション)
データ保持	停電時に、測定データのバックアップ機能を持つ
外部通信	RS485半2重通信(ウローミニ管理システム接続端子)
本体寸法	幅350×奥行215×高さ995(突起を含まず)
電源、消費電力	AC100V±10%(50Hz/60Hz)最大228W
電撃に対する保護	クラスⅠ B型
重 量	36kg
使 用 水	水道水(上水)をご使用ください。井戸水はご使用になれません。
周囲温度	10℃~40℃
相対湿度	30%~85%