

採尿蓄量・比重測定装置

ウローミニ プロ 5300

(20人／30人／40人／50人用)



シンプル操作。

アラームランプ

注意・警告が発生していることを知らせます

パワーインディケーター

大きくブルーのインディケーターが点灯し、パワーオンしていることを知らせます

尿投入口扉

触ることなく自動開閉

パワースイッチ

防水仕様

プリンタ

紙切れ検出機能付きで簡単に記録紙が交換できます

***** オートプリント *****	
* 日付: 04/04/2008 (水) *	
* 印字時間: 08:00 *	

No. 1	
氏 名: 木村 太郎	
I D: 0123456789ABCDEF	
種別: A	
採 尿: 日月火水木金土	
採尿率: 10 %	
採尿日: X	
総 尿 量: 878 ml	
平均比重: 1.017	
回 数: 8 (0)	
平均比重 尿量合計	
P1-P2: 1.011 449	
P1-P3: 1.012 569	
P2-P3: 1.017 114	
P3-P1: 1.025 315	
時刻 比重 尿量 S P	
3月28日	
1) 8:18 1.010 80 * 2	
2) 10:53 1.010 246 * 2	
3) 14:28 1.013 45 * 2	
4) 18:00 1.013 76 * 2	
5) 19:19 1.015 57 * 3	
6) 21:07 1.016 57 * 3	
7) 23:16 1.019 26 * 1	
3月29日	
8) 7:42 1.026 289 * 1	

キャスター

ストッパー付で、高さが調整可能

施錠鍵付

鍵がかかります

カラー液晶タッチパネル

防水タイプなので濡れた手でも大丈夫

人感センサー

省エネ対応

尿投入口

3,100mlまで測定可能な大容量容器

トップカバー受け皿



清掃が容易にできる脱着式になっています

洗浄液ボトル

強力洗浄でいつも清潔に使用できます

薬液ボトル

一部採尿に添加する薬液を自動注入します


採尿バック

キャップ付で、回収が容易にできます


こちらも選択できます

サンプリングボトル

従来型のプラスチック製のサンプリングボトルもご使用になれます。

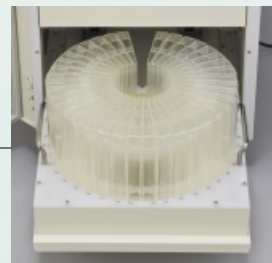

簡単な入力方式。

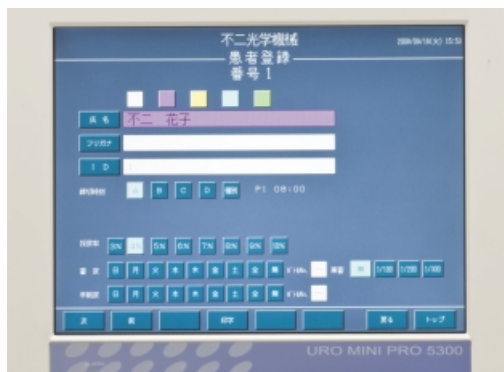

カラー液晶タッチパネル

患者様登録時に色分け設定を行うと、トップ画面の患者キーの色分けができます。弱視の方など文字の識別が難しい方に、色で分かりやすく表示します。

ご使用人数に合わせて選べる4種類のタッチパネルをご用意。



20人用




30人用



40人用



50人用

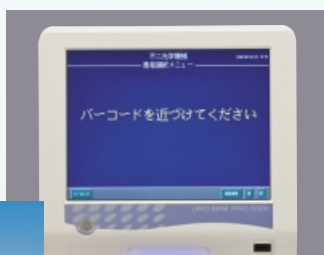

バーコード使用時のトップ画面

バーコード使用時にはトップ画面の患者キーを表示しないよう選択できます。
(個人情報保護に適合)



バーコード入力

装置に触ることなくボタンを押し間違えることもありません。高齢者の方やタッチパネルが苦手な方でも安心できます。(オプション) リストバンドも対応できます。




バーコード入力時のトップ画面

患者様の名前が大きく表示され、見やすくなりました。


データ集中管理。

ウローミニ管理システムは、ナースステーションで各病室に置かれたウローミニから情報を一元管理することができます。

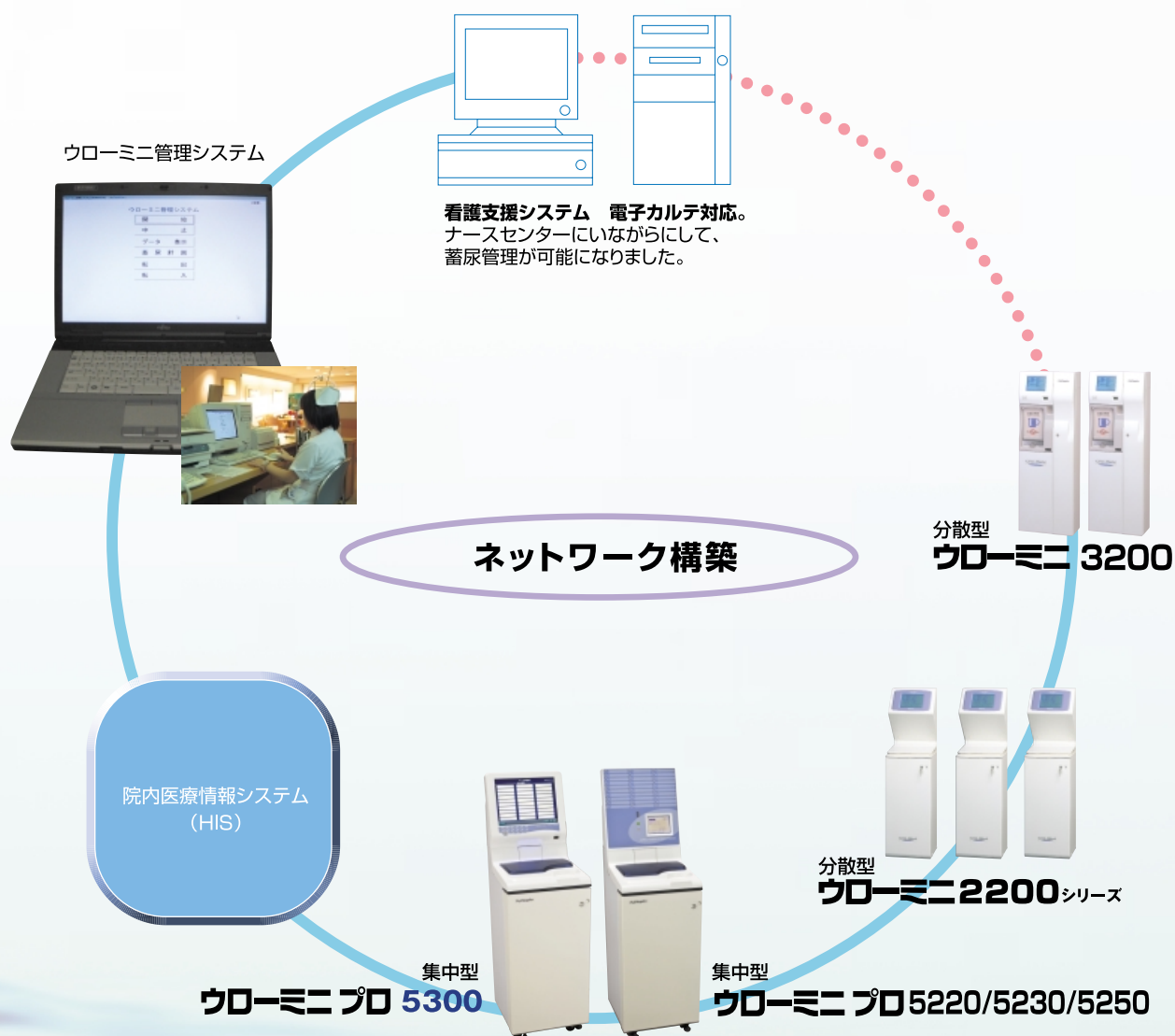


ナースステーションでのパフォーマンス

- ・入退院時の氏名データの入力や削除
- ・各患者さんの測定データ、グラフの閲覧や印刷
- ・蓄尿設定などのすべての機器の設定

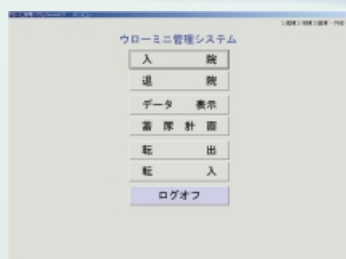

電子カルテとの連携

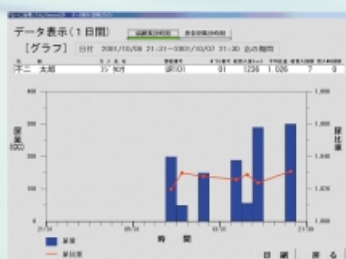

院内の看護支援システムと接続し、看護データに尿データを組み込むことも可能です。また、転室などでデータの組み替えなどの管理も可能です。

快適機能。

現場の看護師様のご意見を尊重し、
モデルチェンジ時に役立てています。

■15インチの大型ディスプレイ

カラーの見やすい大型ディスプレイを採用し、タッチする際も操作がしやすくなりました。

■患者名を色分けすることが可能

5色の色から選択できるので、文字の認識がしづらい患者様も識別が容易になりました。

■一部採尿・早朝尿が採れる

サンプリング容器は採尿バッグかプラスチック容器を選択できます。

■音声案内も選択可能に

測定時に患者様の名前を読み上げることができます。また、昼夜の音量設定が可変できます。

■24時間蓄尿管理

装置単体で測定データの締めめの4つのグループが可能です。また、個別締め設定も可能です。

■バーコード印字が可能

一部採尿時に採尿区間データとIDバーコードの印刷が可能です。

■薬液ボトルがセット可能

薬液ボトルがセットでき、さまざまな薬液を自動で一部採尿に添加することができます。

■測定洗浄時間が、業界最速25秒

200ccの尿を分注なしで測定した場合に可能です。

■本体はステンレス樹脂で構成

ステンレスなので錆は発生しません。またアルコールで消毒できます。

■リストバンドのバーコードも、使用できます。

仕 様

ウローミニプロ 5300

項 目	内 容
製 品	ウローミニプロ5300
測 定 人 数	20人／30人／40人／50人（プログラム設定で選択可能）
採 尿 数	37検体（通常採尿30～37検体、早朝尿0～7検体、早朝尿7人まで設定可）
採尿バッグ容量	最大220ml採尿
採尿量設定	①毎回の測定尿量から予め入力された％（採尿率）で尿採取を行う。 ②全量の3～10％（1％ステップ）で設定入力可能。
測 定 項 目	①一回毎の尿量、尿比重 ②個別に24時間毎の総尿量、平均比重 ③1日6区分まで途中締めデータの管理が設定可能 ④通信機能により他器からの測定データ（尿糖等）管理可能（但し、オプション現在開発中）
測 定 範 囲	尿比重 1.000～1.075 尿量 20～3100ml
測 定 精 度	尿比重 ±0.003 尿量 20～199ml±10％ 200～3100ml±5％
測 定 時 間	25秒以内（但し、200ml以内で採尿設定無しの場合）
操 作 性	①患者使用時に画面表示及び音声で操作案内機能があり、また画面に使用番号および患者名（漢字表示可能）が大きく表示されカナ氏名入力により患者名の音声出力ができる。 ②設定等の操作が画面上で行えるタッチキーを使用しているので画面案内に従って画面に触れることで簡単に操作ができる。
印 字 機 能	①ラインサーマルプリンターを本器に内臓しているので、プリント時間が速く印字できる。
表 示 機 能	バックライト付きグラフィックLCD ①表示項目 ・年月日時分、患者番号、患者氏名（漢字可能）、24時間の総尿量と平均比重、また途中締め尿量、平均比重、及び1回毎の尿量と比重値
記 憶 容 量	①毎回の尿量、尿比重データ30日前まで（最大20,000検体分）
外 部 通 信	①データ入出力（RS232C）×2ポート②バーコード入力（RS232C）③ウローミニ管理システム（RS485）
排 水 機 能	強制排水ユニット（オプション）
本 体 寸 法	本体のみ（幅）395×（奥行）436.5×（高さ）1296
電源、消費電力	AC100V±10%（50/60Hz）、最大120VA（オプション排水ユニット付150VA） 漏電ブレーカ内蔵
重 量	約56kg
使 用 水	水道水（軟水）をご使用下さい。井戸水はご使用になれません。

消 耗 品



- ①ウローミニ採尿バッグ
- ②ウローミニ洗浄液
- ③採尿カップ（オプション）
- ④記録紙（本体内部プリンタ用）
- ⑤ネームカード
- ⑥バーコードシール（オプション）
- ⑦三角サンプリングボトル（オプション）

FujiKogaku 不二光学機械株式会社 E-mail:uro@fujikogaku.co.jp service@fujikogaku.co.jp

本 社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-35-4

事 業 所 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町1358-13

大 阪 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-6-60 ブラザ新大阪407号室

☎ 03-3813-3511(代) FAX.03-3813-3512

☎ 048-929-3511(代) FAX.048-929-3512

☎ 06-4807-7671(代) FAX.06-4807-7672

ホームページアドレス <http://www.fujikogaku.co.jp>